

# Fiche de réalisation du protocole de nettoyage et de désinfection approfondie du VSAV / VSAB

DATE : .....

## Objet de l'application du protocole

- Transport particulièrement sale
- Transport d'une victime atteinte d'une maladie contagieuse (à préciser)
- Entretien mensuel pour les CIS de catégories C et D
- Entretien hebdomadaire pour les CIS de catégories A et B

Demander au Chef de Salle du CTA/CODIS la possibilité de mettre le VSAV / VSAB indisponible.

## 1 ►► Élimination des déchets contaminants

- Se laver les mains
- Mettre des gants à usage unique
- Mettre tous les déchets contaminants dans le sac poubelle jaune
- Sortir tous les éléments démontables du VSAV / VSAB et le petit matériel ayant été utilisé lors de l'intervention

## 2 ►► Vider le reste de la cellule

- Vider le reste de la cellule y compris le contenu des tiroirs et des étagères
- Sortir les tiroirs et les valises
- Sortir les bouteilles d'oxygène
- Enlever les gants en les retournant sur eux même
- Mettre les gants dans le sac poubelle jaune
- Se laver les mains
- Mettre des gants à usage unique

Diluer un sachet de solution décontaminante dans 8 litres d'eau dans le seau rouge. Remplir le seau bleu d'eau tiède.

## 3 ►► Nettoyage et désinfection de la cellule sanitaire (du fond vers les portes, de haut en bas et du plus propre au plus sale)

- Décontaminer le plan de travail extérieur
- Imbiber la lingette dans le seau rouge. Procéder à la décontamination selon la technique des deux seaux
- Nettoyer le plafond, les barres de soutien, les bouches d'extractions
- Nettoyer les étagères en insistant sur les recoins
- Nettoyer les surfaces latérales et les poignées
- Nettoyer le plan de travail (le lavabo), la banquette et/ou les sièges
- Nettoyer le support du brancard

## 4 ►► Nettoyage et désinfection de la cabine conducteur

- Imbiber la lingette dans le seau rouge
- Nettoyer le volant et le tableau de bord
- Nettoyer le levier de vitesse, le frein à main, la radio, (insister sur la pédale TALCO)
- Nettoyer les poignées
- Effectuer un balayage humide et laver le sol (technique des deux seaux)
- Jeter les gants dans le sac jaune

## 5 ►► Nettoyage et désinfection du petit matériel

- Mettre des gants à usage unique
- Remplir le bac de trempage avec un sachet de solution décontaminante et 8 litres d'eau
- Mettre le petit matériel immergeable dans la cuvette et le laisser tremper 20 minutes
- Sortir le matériel et le laisser sécher sur une surface propre
- Nettoyer le brancard et le matelas coquille
- Nettoyer l'aspirateur de mucosités et le défibrillateur semi-automatique
- Nettoyer le matériel de contention
- Mettre le BAVU et le masque sous emballage de protection, si possible
- Nettoyer et désinfecter le matériel démontable et non immergeable du VSAV / VSAB avec le pulvérisateur. Ne pas rincer, ne pas essuyer. Laisser sécher
- Jeter les gants à usage unique en les retournant sur eux-mêmes
- Se laver les mains

## 6 ►► Réapprovisionnement du véhicule

- Remettre l'ensemble du matériel dans le VSAV / VSAB

## 7 ►► Nettoyage du sol de la cellule sanitaire

- Effectuer un balayage humide
- Nettoyer le sol de la cellule avec les bandeaux pour le sol
- Laisser sécher le véhicule 20 minutes, portes fermées

## 8 ►► Entretien du matériel de désinfection

- Nettoyer le matériel ayant servi à la désinfection
- Ranger le matériel
- Remplir le cahier de suivi du VSAV / VSAB
- Remettre le véhicule disponible au CTA, par l'intermédiaire de Systel